


## ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОКАЛЫВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА LANZO

Прокалывающее устройство LANZO предназначено для осуществления безболезненного прокола кожи пальца или иных частей тела с целью получения образца капиллярной крови для проведения анализа на уровень глюкозы или иных тестов, для которых требуется одна или две капли капиллярной крови.

Устройство позволяет устанавливать один из 5 уровней глубины прокола, путем вращения наконечника. От использованного ланцета можно избавиться с помощью специальной клавиши.

### ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Никогда не используйте ланцет, который использовался кем-то еще. Это может привести к заражению.
- Если прокалывающее устройство должно использоваться другим человеком, устройство должно быть должным образом продезинфицировано и вставлен новый стерильный ланцет, после чего устройство может использоваться.
- Не оставляют ланцет в устройстве для прокалывания после использования.
- Новый ланцет вставляется в прокалывающее устройство непосредственно перед использованием.
- Прокалывающее устройство имеет много мелких частей и может представлять опасность для маленьких детей.
- При использовании в стационаре, для предотвращения любого загрязнения, больницы должны соблюдать собственные протоколы контроля инфекции.
- Всегда выбрасывайте использованные ланцеты в контейнеры для биологически опасного мусора.

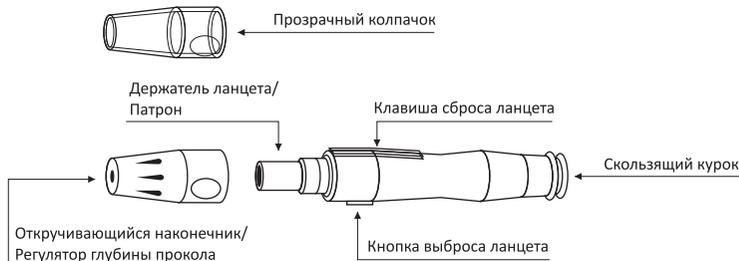

### КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРОКАЛЫВАЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ

Тщательно вымойте руки теплой водой, чтобы усилить кровообращение в пальцах рук. Высушите руки полностью, в том числе палец, который будет прокалываться. Пожалуйста, ознакомьтесь с пошаговой инструкцией прокалывающего устройства LANZO и внимательно изучите пошаговые иллюстрации к ней, чтобы понять, как использовать устройство.

1. Отвинтите наконечник прокалывающего устройства, поворачивая его против часовой стрелки, твердо сжимая основание.
2. Двумя пальцами выдвиньте держатель для ланцета (патрон).
3. Держа патрон двумя пальцами, вставьте новый стерильный ланцет в основание патрона.
4. Открутите защитный наконечник стерильного ланцета.
5. Прикрутите на место по часовой стрелке наконечник устройства для прокалывания.



6. Держите левой рукой съемный наконечник устройства для прокалывания, а правой оттяните конец ручки устройства для прокалывания до щелчка и отпустите. Устройство готово для применения.
7. Отрегулируйте глубину прокола (от 1 до 5). Приложите устройство для прокалывания к месту желаемого прокола. Держите устройство для прокалывания напротив боковой поверхности подушечки пальца, слегка опираясь кончиком устройства с отверстием для выпуска иглы на палец. (Чем сильнее нажатие, тем глубже прокол.) Нажмите кнопку для прокола.
8. Отвинтите наконечник устройства для прокалывания.
9. Извлеките использованный ланцет, сдвинув клавишу на корпусе прокалывающего устройства (прокалывающее устройство должно быть заряжено, как перед взятием образца крови). Выбросьте использованный ланцет в специальный контейнер биологической опасности.

### РЕКОМЕНДУЮТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЛАНЦЕТЫ:

Совместно с прокалывающим устройством рекомендуются к применению ланцеты известных торговых марок: Droplet, BD-Ultra Fine, Microlet, Monolet, One Touch, Soft Touch, Unilet GP.

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЗРАЧНОГО КОЛПАЧКА

- A) Плотно прижмите прокалывающее устройство к выбранному для прокола и взятию образца крови месту. Нажмите кнопку выпуска, чтобы произвести прокол.
- B) Через прозрачный колпачок убедитесь, что набран достаточный образец крови. В случае если крови недостаточно, мягко массируйте область прокола, чтобы усилить кровоток.

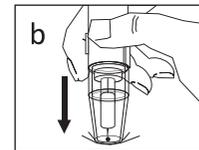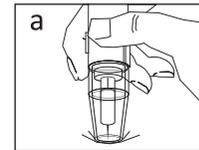

### ХРАНЕНИЕ

Продукция должна храниться при комнатной температуре, защищенном от солнечного света и влажности помещении.

### ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Очистку прокалывающего устройства LANZO рекомендуется проводить не реже одного раза в неделю. Очистке подвергается внешняя сторона корпуса устройства. Используйте для очистки и протирки LANZO мягкую ткань, слегка смоченную в мыльном растворе. Откручивающийся наконечник и прозрачный колпачок можно мыть слабым мыльным раствором. Не погружайте полностью устройство для прокалывания в жидкость.

### ГАРАНТИЯ

Устройство для прокалывания имеет гарантию 2 года с даты покупки.