

AmnioQuick

АмниоКвик

ТЕСТ НА ПОДТЕКАНИЕ
ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД

средства медицинской
диагностики





Сделано во Франции

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Основанная в 1993 году, компания Biosynex является в настоящее время лидером в области экспресс-тестов с лабораториями во Франции. Девиз компании - «Легкая диагностика для каждого». Biosynex предлагает потребителям полный набор тестов и реагентов, а также инструментов, пригодных для лабораторий.

Так же с недавнего времени компания Biosynex запустила в производство линейку инструментов и реактивов для молекулярной биологии.



ТЕСТЫ AMNIOQUICK

AMNIOQUICK - это быстрый иммунохроматографический тест для *in vitro* диагностики околоплодных вод в экстракте влагалищного мазка беременной женщины.

Тест разработан для определения разрыва плодной оболочки у беременной женщины при подозрении такого разрыва.


Набор AmnioQUICK - самодостаточная тестовая система, которая обеспечивает качественные результаты, превосходит по скорости, точности, чувствительности, специфичности и надежности существующие методы.

ПРОЦЕДУРА ТЕСТИРОВАНИЯ

- 1 Перед тестированием тест-набор и образцы должны достичь комнатной температуры. Когда упаковка открыта, тест-полоску следует использовать в течение часа.
- 2 Откройте пузырек с раствором и поставьте вертикально на ровную горизонтальную поверхность.
- 3 Достаньте тампон из упаковки. Осторожно введите дакроновый наконечник тампона во влагалище пока пальцы не коснутся кожи (на глубину 5 сантиметров). Выньте тампон из влагалища через 1 минуту.

ПРОЦЕДУРА ТЕСТИРОВАНИЯ

- 4 Затем опустите дакроновый наконечник тампона в пузырек и ополосните его в растворе делая вращательные движения в течение 10 секунд. После этого извлеките тампон.
- 5 Опустите в раствор тест-полоску стрелками вниз. Осторожно опустите тест-полоску до дна пробирки, оставьте полоску в вертикальном положении в пробирке в течение 10 минут.
- 6 Достаньте тест-полоску через 10 минут. Прочитайте результат, положив тест на чистую, сухую, плоскую поверхность.

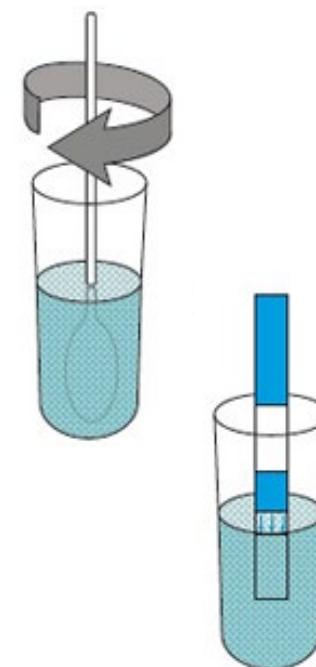

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ



Одна полоска

Разрыва оболочек нет



Две полоски

Разрыв есть



Нет полосок

Тест проведен некорректно,
используйте другой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ✓ **Определяет** IGFBP-1 (белок-1, связывающий инсулиноподобные факторы роста) в околоплодных водах беременной женщины.
- ✓ **Контроль верности теста** основан на взаимодействии иммуноглобулина G козы (IgG) к антителу мыши и конъюгированного моноклонального антитела к IGFBP-1. Цветовой сигнал генерируется частицами коллоидного золота.
- ✓ **Специфичность** — не менее 91%.
- ✓ **Чувствительность** — не менее 100%.
- ✓ **Предел обнаружения** — тест способен обнаружить 1 мкл околоплодных вод.
- ✓ **Хранение** — при температуре от +2 °C до +30 °C.
- ✓ **Комплектация теста:**
 - Тест-полоска во влагонепроницаемой упаковке из фольги с влагопоглотителем;
 - Стерильный дакроновый влагалищный тампон;
 - Пузырек с одной дозой экстракционного буфера.
- ✓ **Инструкция:**
 - Групповая упаковка: одна инструкция на 10 тестов;
 - Индивидуальная упаковка: в каждой коробочке с тестом одна инструкция.
- ✓ **Срок годности** — не менее 50%.

СОСТАВ ТЕСТ-НАБОРА

- ✓ Инструкция.
- ✓ Тест-полоска в индивидуальной упаковке с влагопоглотителем.
- ✓ Стерильный дакроновый влагалищный тампон. Пузырек с одной дозой экстракционного буфера.

ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ

Тест AMNIOQUICK упакован во влагонепроницаемую упаковку из фольги с влагопоглотителем. Его следует хранить в прохладном и сухом месте, при температуре 2-30°C.

Срок годности тест-набора указан на упаковке с тест-полоской.

Полоски нельзя замораживать и необходимо защищать от влажности: когда упаковка открыта, тест-полоску следует использовать в течение часа.



ОПТИМАЛЬНАЯ ЦЕНА

Для уточнения цен отправьте Вашу заявку на адреса электронной почты, указанные ниже:

Office@opt-mmol.com

Office2@opt-mmol.com

